


Durchführung Wangenabstrich mit 3 Wangenabstrichstäbchen für HLA und CMV

Die Entnahme der Wangenschleimhautzellen sollte frühestens eine Stunde nach der letzten Mahlzeit, Getränk oder dem Zähneputzen erfolgen. So wird eine Beeinflussung der Analyse ausgeschlossen.

Reißen Sie die sterile Verpackung der Wangenabstrichstäbchen vorsichtig auf. Dabei den Kopf der Wangenabstrichstäbchen nicht mit den Fingern berühren.

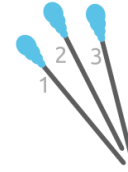

Benutzen Sie bitte **alle drei** Wangenabstrichstäbchen.

- Streichen und rotieren Sie mit dem Kopf des Wangenabstrichstäbchens unter Druck mindestens **1 Minute** über die Innenseite der Wange. Nutzen Sie auch die Umschlagfalten des Ober- und Unterkiefers.
- Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Wangenabstrichstäbchen und streichen Sie für **1 Minute** mit rotierender Bewegung über die Innenseite der anderen Wange und den Umschlagfalten des Ober- und Unterkiefers.
- Mit dem dritten Wangenabstrichstäbchen streichen Sie rotierend über die Innenseite der Ober- und Unterlippe. Außerdem sollten Sie die linke und rechte Wange noch einmal für 1 Minute benutzen.

Hinweis: Speichel allein ist nicht ausreichend! Es werden Schleimhautzellen benötigt.
Die Verpackung wird nicht länger benötigt und kann entsorgt werden.




Lassen Sie die benutzten Wangenabstrichstäbchen **2 Minuten** in der Hand trocknen (alternativ in einem Gefäß mit dem Abstrichköpfchen nach oben). Stellen Sie sicher, dass das Abstrichköpfchen nicht in Kontakt mit anderen Dingen kommt.



Die fertigen Abstrichstäbchen ohne Plastikverpackung in den kleinen Umschlag stecken. Entfernen Sie die Folie des kleinen runden Klebepunktes auf der Vorderseite des Umschlages und verschließen Sie diesen.

Hinweis: Bitte legen Sie die drei Wangenabstrichstäbchen lose in den Umschlag. Verpacken Sie diese nicht extra.

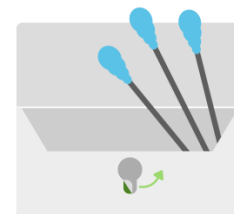

Platzieren Sie den Barcode-Aufkleber in der rechten unteren Ecke der Umschlagaußenseite.

Hinweis: Bitte legen Sie keine anderen Dinge, außer den drei Wangenabstrichstäbchen, in den Umschlag.